


DIAGNOSTIKA INFEKCE EBV

ELISA-VIDITEST

anti-EA(D) EBV IgA

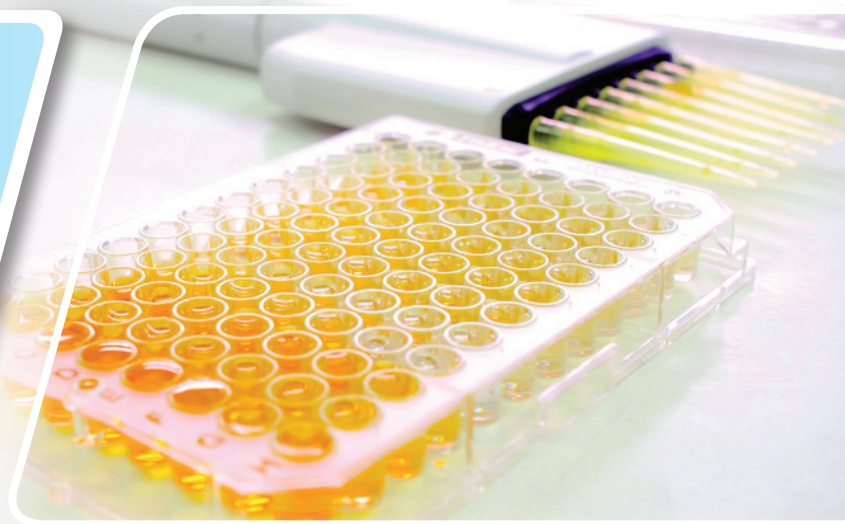

- Doplňkový test pro diagnostiku primoinfekce i reaktivace EBV

- Diagnostika a hodnocení rizika vzniku nasofaryngeálního karcinomu

Vybrané markery EBV infekce

Stadium infekce	PROTILÁTKY					
	VCA IgG	VCA IgM	EBNA-1 IgG	EA IgG	EA IgM	EA IgA
Latence	+ až +++	-	+ až +++	- nebo +	-	-
Primární infekce	+ až +++	+++	-	- nebo +++	++ až +++	- nebo ++
Reaktivace	+++	- nebo +	+ až +++	++ až +++	- nebo +	+ až ++

- negativní na specifické protilátky
+ pozitivní na specifické protilátky



VIDIA spol. s r.o.
Nad Safinou II č. 365, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy

Objednávky – tel.: +420 261 090 565
fax: +420 261 090 566
e-mail: objednavky@vidia.cz
On-line objednávky: www.vidia.cz

Web: <http://www.vidia.cz>
Odborné info – tel.: +420 261 090 577
e-mail: info@vidia.cz

IVD soupravy pro detekci anti-EA(D) EBV IgA

katalogové číslo	produkt
OD-254	ELISA-VIDITEST anti-EA(D) EBV IgA

Parametry soupravy ELISA-VIDITEST anti-EA(D) EBV IgA

	celkem vzorků	Pozitivní	Hraniční	Negativní	
Anti-EA(D) EBV negativní	130	0	1	130	Specifita: 100%
Anti-EA(D) EBV pozitivní	32	31	1	0	Citlivost: 100%

Hraniční vzorky byly při hodnocení vyloučeny.

Záchyt IgA protilátek proti EA(D) EBV:

Panel sér	Počet vyšetřených	Počet pozitivních	%
Infekční mononukleózy	33	17	52%
Reaktivace EBV (anti-EA(D) IgG +++/+++)	24	14	58%
Krevní dárči	72	0	0%
EBV- séronegativní	23	0	0%
Anti-CMV IgA pozitivní	6	0	0%
Anti-HSV IgA pozitivní	7	0	0%

Proč ELISA-VIDITEST anti-EA(D) EBV IgA:

- Anti-EA(D) EBV IgA se nevyskytují u latentní infekce
- Kompatibilní s jinými ELISA-VIDITEST soupravami – možnost testování celého herpetického panelu z jednoho ředění vzorku
- Konjugát a kontroly v pracovní koncentraci
- Unifikovaná šedá zóna

